

## • UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA APARATU

- Wapozon podłączać tylko do gniazdka z bolcem uziemiającym.
- Aparat powinien stać równo w pozycji poziomej.
- Aparat poddany silnemu wstrząsowi np. upadkowi, uderzeniu powinien być oddany do producenta w celu dokonania przeglądu.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
- Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w układzie jest zabronione.
- Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomb jest równoznaczne z utratą gwarancji, a producent nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia.
- Ozon stosować zgodnie z potrzebami

## • KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- **Codziennie po skończonej pracy odkręcić kranik spustowy i zlać całkowicie wodę ze zbiornika.**

### **Czyszczenie zbiornika:**

Jeżeli **na wyświetlaczu pojawi się komunikat „odkamienić zbiornik”** należy:

- rozpuścić 2 łyżki kwasu cytrynowego w litrze wody
- wlać roztwór do zbiornika
- włączyć wapozon
- gdy zacznie parować po 10 minutach wyłączyć i zlać wodę
- przepłukać

### **UWAGA! Nie stosować innych środków odkamieniających, mogą one powodować korozję zbiornika i uszczeltek.**

Po opróżnieniu zbiornika wapozonu i rozpoczęciu kolejnego parowania może nastąpić niewielkie skroplenie w okolicach kraniku skutkujące skapnięciem niewielkiej ilości wody z zaworu spuszczonego wodę.

Wszelkich zabiegów konserwacyjnych dokonywać tylko **przy wyłączonym z sieci aparacie**. Aparat czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną w wodzie, bez użycia rozpuszczalników.



05-820 Płastów  
ul. Stońskiego 13  
tel./fax: (0-22) 723-69-54  
tel. (0-22) 723-70-72  
e-mail: [biomak@biomak.pl](mailto:biomak@biomak.pl)  
[www.biomak.eu](http://www.biomak.eu)

## WAPOZON VP 300 / VP 300Z

### INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Wapozon VP 300 (Nr kat. 10113) jest urządzeniem służącym do nawilżania skóry twarzy i ciała oraz ozonoterapii. Posiada możliwość stosowania olejków aromatycznych i ziół (VP 300 Z - nr kat. 10116).

#### Charakterystyka:

- wyświetlacz LCD;
- sterowanie mikroprocesorem;
- komunikaty w języku polskim;
- blokada grzałki w przypadku braku wody i przy przepełnionym zbiorniku;
- elektroniczny zegar umożliwiający ustawienie czasu parowania i czasu korzystania z ozonu;
- elektroniczny system podtrzymujący temperaturę wody na poziomie 95°C;
- gotowość do pracy ok. 1 min.;
- czas parowania pełnego zbiornika ok. 45 min.;
- pojemność ok. 1,2 litra;
- w dyszy wylotowej posiada filcową wkładkę do stosowania olejków;

#### Dane techniczne:

- zasilanie 230V, 50Hz
- moc pobierana 600 W
- długość ramienia 60 cm
- wymiary obudowy 245x210x160mm
- ciężar 5,9 kg



## ● PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Umocować wapozon na statywie lub stoliku.
2. Włączyć wtyczkę do **gniazdka 220V z uziemieniem**.
3. Włączyć przycisk **POWER**. Na ekranie pokaże się napis **\*BIOMAK\***, następnie **VP300** i kolejno 

<b>P 20m O 05m</b>
--------------------

  
**P 20m** - oznacza czas parowania  
**O 05m** - oznacza czas działania ozonu  
Gdy zbiornik jest pusty na ekranie pojawi się komunikat **dolej wody**, miga **żółta dioda** i słychać sygnał dźwiękowy. Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona.
4. Przez otwór znajdujący się w górnej części obudowy wlać **destylowaną** lub **miękką, przegotowaną, odstaną (ok. 12 godzin) wodę**. Wlewać ją do chwili zapalenia się **drugiej zielonej diody**.
5. Jeżeli zbiornik jest przepelniony pokaże się napis **za dużo wody** miga **czerwona dioda** i słychać sygnał dźwiękowy. Grzałka jest wówczas automatycznie odłączona. Należy odkręcić kranik spustowy (mieszczący się w dolnej części aparatu) i spuszczać wodę do momentu zgaśnięcia czerwonej diody.

## ● USTAWIENIE CZASU PRACY

1. Czas parowania ustawić klawiszami ▼ i ▲. Aby zmienić czas pracy ozonu należy nacisnąć i trzymać klawisz **STOP/OZONE** a klawiszami ▼ i ▲ ustawić żądany czas. **Ozon włącza się pod koniec parowania wody i wyłącza się razem z parowaniem wody**.
2. Aby rozpocząć zabieg należy nacisnąć klawisz **START/PAUSE**. Od momentu pojawienia się pary zacznie się odliczanie czasu.
3. Aby przerwać zabieg należy nacisnąć klawisz **STOP/OZONE**. Na ekranie pojawią się poprzednio ustawione czasy pracy.
4. Aby przerwać zabieg na chwilę należy nacisnąć klawisz **START/PAUSE**. Migają wtedy cyfry czasów.
5. Co kilkanaście godzin użytkowania pojawi się napis **odkamień zbiornik** (patrz 'konserwacja i czyszczenie').

## ● STOSOWANIE OLEJKÓW AROMATYCZNYCH

W dyszy wylotowej umieszczona jest filcowa wkładka, którą stosuje się przy pracy z olejkami aromatycznymi. Kilkom kroplami olejku nasącza się filc. Po zakończonym zabiegu, w którym były stosowane olejki wkładkę filcową należy wyjąć i wypłukać pod bieżącą wodą z kranu.

**UWAGA!** Olejków aromatycznych nie wolno wlewać do zbiornika!

## ● STOSOWANIE OZONU

Aby włączyć ozon należy wcisnąć przycisk OZONE. Aby wyłączyć funkcję ozonu, należy ponownie wcisnąć przycisk OZONE.

**UWAGA!** Włącznik **OZONE** działa tylko wtedy, gdy w aparacie jest odpowiednia ilość wody (sygnalizowane jest to świeceniem się jednej lub dwóch **zielonych diod**).

## ● STOSOWANIE ZIOŁ dotyczy - VP 300Z (Nr kat. 10116),

Aby przygotować wapozon do stosowania ziół należy:

1. wyjąć metalowy lejek znajdujący się w otworze wlewowym,
2. wlać wodę (destylowaną lub przegotowaną, odstaną ok. 12 godzin) do zbiornika,
3. włożyć sitko
4. włożyć torebkę z ziołami
5. włożyć korek i **mocno go docisnąć**.

Po zakończonym zabiegu wyjąć sitko z ziołami. Spuścić wodę z wapozonu odkręcając kranik spustowy. Przepłukać zbiornik czystą wodą (w tym celu można się posłużyć wodą z kranu -wlać ją przez otwór wlewowy i całkowicie wylać odkręcając kranik spustowy).

Po przepłukaniu zbiornika włożyć lejek w otwór wlewowy i **mocno go docisnąć**.

**UWAGA!** Zioła wolno stosować tylko w torebkach wkładając je na sitko. **Nie wolno wlewać naparu z ziół ani wsypywać ich do zbiornika wapozonu**. Nie wlewać wody przez sitko, na którym znajdują się zioła (drobne fragmenty ziół mogłyby się dostać do zbiornika). Chcąc uzupełnić wodę wyjąć sitko.

**UWAGA!** Korek i sitko używać tylko przy pracy z ziołami, w innym przypadku stosować tylko lejek.